

α 1 – Glicoproteína Ácida Mono Kovalent

Apresentação:

Artigo	Apresentação
4080050K	2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão
4080100K	4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão

Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
 Monoreagente: Pronto para uso
 Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas Alto 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

EXPRESS 550

TEST PARAMETERS			
Test Name	AGP mono	Test	AGP mono
Test Bar Code			
Test Type	TwoPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	600 nm
Read Time Interval	360	Sample Blank?	No
Factor	1.000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.120	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.120	High A Limit	2.000
Low Normal	40	High Normal	130
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST REAGENTS			
Test Name	AGP mono	Test	AGP mono
Test Bar Code			
Sample Volume	8 μ L	Sample Diluent	NaCl
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	10
Reagent Diluent			
	Vol.	Bar Code	Diluent Volume
Reagent 1:	250 μ L	AGPM	Lag Time
Reagent 2 :			10 Seconds
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da α 1- Glicoproteína Ácida- Mono Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

Anti-estreptolisina O Kovalent

Apresentação:

Artigo	Apresentação
4060030K	R1 1x5ml Látex + R2 1x25ml Tampão + 1x1 ml Padrão
4060060K	R1 1x10 ml Látex + R2 2x25ml Tampão + 1x1 ml Padrão

ATENÇÃO:

O reagente R1 Látex deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R2 do equipamento.

O reagente R2 Tampão deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R1 do equipamento.

Preparação do Reagente

Amostra:	Pronto para uso
Reagente 1:	Pronto para uso
Reagente 2:	Pronto para uso
Calibrador:	Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.



EXPRESS 550

Instrument setting

TEST PARAMETERS			
Test Name	ASLO	Test	ASLO
Test Bar Code			
Test Type	Endpoint	Curve Type	2-Logit-5
Units	UI/mL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	600 nm	Secondary wavelength	none
Read Time Interval	20	Sample Blank?	Yes
Factor	1.00000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	5	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.5000	High Blank A Limit	2.5000
Low A Limit	-0.5000	High A Limit	2.5000
Low Normal	*	High Normal	*
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST PARAMETERS			
Test Name	ASLO	Test	ASLO
Test Bar Code			
Sample Volume	4 µL	Sample Diluent	
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	1
Reagent Diluent			
	Reagent Vol.	Bar code	Diluent Volume
Reagent 1	250 µL	ASLO2	Lag Time
Reagent 2	50 µL	ASLO1	60 seconds
Reagent 3			450 seconds
Reagent 4			

* Valor de referência.

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da Anti-estreptolisina O Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

Fator Reumatóide Kovalent

Apresentação:

Artigo nº	Apresentações
4050030K	R1 1 x 5 mL Anticorpo + R2 1x 25 mL Tampão + 1 x 1 mL Padrão
4050060K	R1 1 x 10 mL Anticorpo + R2 2 x 25 mL Tampão + 1 x 1 mL Padrão
4050150K	R1 1 x 25 mL Anticorpo + R2 5 x 25 mL Tampão + 1 x 1 mL Padrão

ATENÇÃO:

O reagente R1 Anticorpo deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R2 do equipamento.

O reagente R2 Tampão deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R1 do equipamento.

Preparação do Reagente

Amostra:	Pronto para uso
Reagente 1:	Pronto para uso
Reagente 2:	Pronto para uso
Calibrador:	Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Express 550

Instrument setting

TEST PARAMETERS			
Test Name	RF	Test	RF
Test Bar Code			
Test Type	Endpoint	Curve Type	2-Logit-5
Units	IU/mL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	none
Read Time Interval	20	Sample Blank?	Yes
Factor	1.00000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.5000	High Blank A Limit	2.5000
Low A Limit	-0.5000	High A Limit	2.5000
Low Normal	0	High Normal	20
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST PARAMETERS			
Test Name	RF	Test	RF
Test Bar Code			
Sample Volume	14 µL	Sample Diluent	
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	1
Reagent Diluent			
	Reagent Vol.	Bar code	Diluent Volume
Reagent 1	250 µL	RF1	Lag Time
Reagent 2	50 µL	RF2	60 seconds
Reagent 3			450 seconds
Reagent 4			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula do Fator Reumatóide Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

IgA Mono Kovalent

Apresentação:

Artigo	Apresentação
4020050K	2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão
4020100K	4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão

Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
 Monoreagente: Pronto para uso
 Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas Alto 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

EXPRESS 550

TEST PARAMETERS			
Test Name	IGA mono	Test	IGA mono
Test Bar Code			
Test Type	TwoPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	600 nm
Read Time Interval	360	Sample Blank?	No
Factor	1.000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.120	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.120	High A Limit	2.000
Low Normal	70	High Normal	406
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST REAGENTS			
Test Name	IGA mono	Test	IGA mono
Test Bar Code			
Sample Volume	4 µL	Sample Diluent	NaCl
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	10
Reagent Diluent			
Reagent 1:	Vol. 250 µL	Bar Code IGAM	Diluent Volume Lag Time 10 Seconds
Reagent 2 :			
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da IgA- Mono Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

IgG Mono Kovalent

Apresentação:

Artigo	Apresentação
4010050K	2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão
4010100K	4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão

Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
 Monoreagente: Pronto para uso
 Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas Alto 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

EXPRESS 550

TEST PARAMETERS			
Test Name	IGG mono	Test	IGG mono
Test Bar Code			
Test Type	TwoPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	600 nm
Read Time Interval	360	Sample Blank?	No
Factor	1.000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.120	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.120	High A Limit	2.000
Low Normal	680	High Normal	1445
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST REAGENTS			
Test Name	IGG mono	Test	IGG mono
Test Bar Code			
Sample Volume	3 µL	Sample Diluent	NaCl
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	10
Reagent Diluent			
	Vol.	Bar Code	Diluent Volume
Reagent 1:	250 µL	IGGM	Lag Time
Reagent 2 :			10 Seconds
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da IgG- Mono Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

IgM Mono Kovalent

Apresentação:

Artigo	Apresentação
4030050K	2 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão
4030100K	4 x 25 ml + 1 x 1 ml padrão

Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
 Monoreagente: Pronto para uso
 Calibrator: Diluir o padrão de Proteínas Alto 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

EXPRESS 550

TEST PARAMETERS			
Test Name	IGM mono	Test	IGM mono
Test Bar Code			
Test Type	TwoPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	600 nm
Read Time Interval	360	Sample Blank?	No
Factor	1.000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.120	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.120	High A Limit	2.000
Low Normal	33	High Normal	250
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST REAGENTS			
Test Name	IGM mono	Test	IGM mono
Test Bar Code			
Sample Volume	15 µL	Sample Diluent	NaCl
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	10
Reagent Diluent			
	Vol.	Bar Code	Diluent Volume
Reagent 1:	250 µL	IGMM	Lag Time
Reagent 2 :			10 Seconds
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da IgM- Mono Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

Microalbuminúria Kovalent

APRESENTAÇÃO

Artigo nº	Apresentação
4040030K	R1 (Anticorpo) 1x5 mL + R2 (Tampão) 1x25 mL + Padrão 1x1 mL
4040060K	R1 (Anticorpo) 1x10 mL + R2 (Tampão) 2x25 mL + Padrão 1x1 mL

ATENÇÃO:

O reagente R1 Anticorpo deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R2 do equipamento.

O reagente R2 Tampão deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R1 do equipamento.

Preparação do Reagente

Amostra:	Pronto para uso
Reagente 1:	Pronto para uso
Reagente 2:	Pronto para uso
Calibrador:	Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Express 550

Instrument setting

TEST PARAMETERS			
Test Name	MAL	Test	MAL
Test Bar Code			
Test Type	Endpoint	Curve Type	2-Logit-5
Units	mg/L	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	none
Read Time Interval	20	Sample Blank?	Yes
Factor	1.00000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.5000	High Blank A Limit	2.5000
Low A Limit	-0.5000	High A Limit	2.5000
Low Normal	*	High Normal	*
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST PARAMETERS			
Test Name	MAL	Test	MAL
Test Bar Code			
Sample Volume	6 µL	Sample Diluent	
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	1
Reagent Diluent			
Reagent 1	Reagent Vol. 250 µL	Bar code MAL2	Diluent Volume Lag Time 60 seconds
Reagent 2	50 µL	MAL1	450 seconds
Reagent 3			
Reagent 4			

* Valor de referência.

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da Microalbuminúria Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

Proteína C-Reativa Kovalent

APRESENTAÇÃO

Artigo	Apresentação
4070030K	R1 1 x 5 mL Anticorpo + R2 1 x 25 mL Tampão + 1 x 1 mL Padrão
4070060K	R1 1 x 10 mL Anticorpo + R2 2 x 25 mL Tampão + 1 x 1 mL Padrão

ATENÇÃO:

O reagente R1 Anticorpo deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R2 do equipamento.

O reagente R2 Tampão deve ser posicionado no local destinado ao Reagente R1 do equipamento.

Preparação do Reagente

Amostra:	Pronto para uso
Reagente 1:	Pronto para uso
Reagente 2:	Pronto para uso
Calibrator:	Diluir o padrão de Proteínas Alto sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero

EXPRESS 550

Instrument setting

Test Name	CRP	Test	CRP
Test Bar Code			
Test Type	EndPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	2
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	none
Read Time Interval	20	Sample Blank?	Yes
Factor	1.0000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.500	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.500	High A Limit	2.000
Low Normal	0.00	High Normal	1.00
Linearity Limit		Curve SD Limit	
Test Name	CRP	Test	CRP
Test Bar Code			
Sample Volume	16 µL	Sample Diluent	
Rerun Dilution Ratio	1	Predilution Ratio	1
Reagent Diluent	NaCl		
	Vol. Bar Code	Diluent Volume	Lag Time
Reagent 1:	250 µL CRP1		300 Seconds
Reagent 2 :	50 µL CRP2	10 µL	200 Seconds
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

Notas:

1. Por favor, recorra a Bula da Proteína C-Reativa Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo

Transferrina Monoreagente Kovalent

APRESENTAÇÃO

Artigo nº	Apresentações
4110025K	R 1x25 ml + 1x1 ml Padrão
4110050K	R 2x25 ml + 1x1 ml Padrão
4110100K	R 4x25 ml + 1x1 ml Padrão

Preparação do Reagente

Amostra: Diluir amostras e controles 1:10 em NaCl 9 g/L.
 Monoreagente: Pronto para uso
 Calibrador: Diluir o padrão de Proteínas Alto 1:10 (Se o equipamento não realizar esta diluição) e posteriormente diluí-lo sucessivamente 1:2 em NaCl 9 g/L. Utilizar salina como ponto zero.

Express 550

TEST PARAMETERS			
Test Name	TRF	Test	TRF
Test Bar Code			
Test Type	TwoPoint	Curve Type	2-Logit 5
Units	mg/dL	Number of Decimal	0
Primary wavelength	340 nm	Secondary wavelength	none
Read Time Interval	360	Sample Blank?	No
Factor	1.000		
Calibration Interval	168 hours		
Normalization Interval			
No. of Calibrators	6	No. of Replicates	1
Low Blank A Limit	-0.120	High Blank A Limit	2.000
Low A Limit	-0.120	High A Limit	2.000
Low Normal	*	High Normal	*
Linearity Limit		Curve SD Limit	
TEST REAGENTS			
Test Name	TRF	Test	TRF
Test Bar Code			
Sample Volume	7 µL	Sample Diluent	NaCl
Rerun Dilution Ratio	2	Predilution Ratio	10
Reagent Diluent			
	Vol.	Bar Code	Diluent Volume
Reagent 1:	250 µL	TRF	Lag Time
Reagent 2 :			10 Seconds
Reagent 3 :			
Reagent 4 :			

* Valor de referência.

1. Por favor, recorra a Bula da Transferrina Mono Kovalent para informações detalhadas sobre os seguintes testes:

Finalidade

Método

Composição, Armazenamento e Estabilidade dos Reagentes

Amostras

Calibradores e Controles

Desempenho e Características considerando:

- Intervalo de medição
- Especificidade/Interferentes
- Sensibilidade/Limite de Detecção
- Precisão e exatidão
- Valores de referência
- Literatura

2. a estabilidade do reagente a bordo do analisador é pelo menos 4 semanas contanto que sejam evitadas a contaminação e a evaporação. Não Congelar!

3. Fabricado por:

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristovão Sardinha, 110

Jardim Bom Retiro – São Gonçalo